

IDEXX VetConnect⁺ PLUS

für die IDEXX VetLab[®] Station

- Ergebnisse jederzeit und überall abrufen
- Patientenakte des Tieres in nur einer grafischen Darstellung
- Interaktive Trenddiagramme
- Teilen von Ergebnissen mit Partnerkliniken und Tierbesitzern
- Empfang von Benachrichtigungen und Anzeigen neuer Ergebnisse auf Ihrem Smartphone

Erste Schritte

Anmeldung bei VetConnect[®] Plus

- Gehen Sie auf www.vetconnectplus.de
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.




IDEXX VetConnect⁺ PLUS

Anmeldedaten für VetConnect[®] PLUS

Benutzername: _____

Kennwort: _____

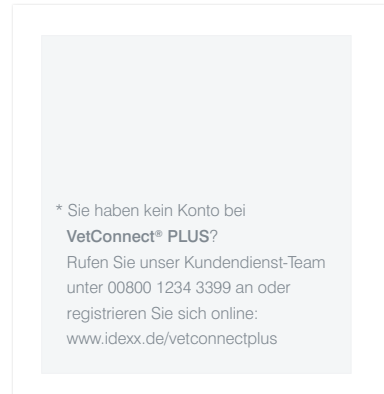

* Sie haben kein Konto bei
VetConnect[®] PLUS?
Rufen Sie unser Kundendienst-Team
unter 00800 1234 3399 an oder
registrieren Sie sich online:
www.idexx.de/vetconnectplus

- Befolgen Sie die Aktivierungsschritte nach Ihrer ersten Anmeldung. Die Aktivierungsschritte sind auf der Rückseite beschrieben.

Nutzen Sie die Vorteile von VetConnect[®] Plus

- Wenn Sie die vier Aktivierungsschritte durchgeführt haben, können Sie VetConnect[®] PLUS verwenden.
- Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie auf www.idexx.de/vetconnectplus

Aktivierungsschritte

- Gehen Sie auf **www.vetconnectplus.de**
- Anmeldung mit Benutzername und Kennwort
- Befolgen Sie die Anweisungen zur schrittweisen Aktivierung

Ihre praxisinternen IDEXX-Befunde werden nun in die Cloud übertragen und nach der Ausführung der folgenden vier Schritte in VetConnect® PLUS verfügbar sein:



1 Stimmen Sie der Benutzervereinbarung von VetConnect® PLUS zu.



2 Lesen Sie die Anweisungen durch oder drucken Sie sie aus.



3 Gehen Sie zur IDEXX VetLab® Station und klicken Sie auf „Einstellungen“. Klicken Sie auf der Registerkarte „VetConnect® PLUS“ auf „VetConnect® PLUS aktivieren“.



4 Ihre Ergebnisse werden nun weitergeleitet.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie können Ihre aktuellen Ergebnisse nun auf VetConnect® PLUS einsehen.

Auf Ihrem Smart-Phone können Sie auch die Vetconnect® PLUS-App verwenden.



Erhalten Sie **Sofortbenachrichtigungen** zu sämtlichen Ergebnissen

Wenn Sie noch Fragen zu VetConnect® PLUS haben, rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 00800 1234 3399 an oder senden Sie eine E-Mail an: cs-germany@idexx.com
www.idexx.de

IDEXX
LABORATORIES