






# So verpacken Sie richtig!

## Ihre Probeneinsendung mit der Deutschen Post

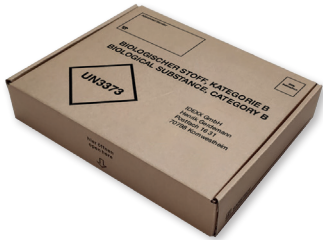

1 x 

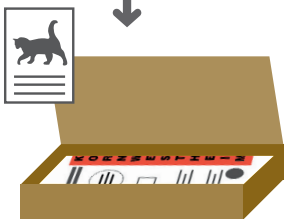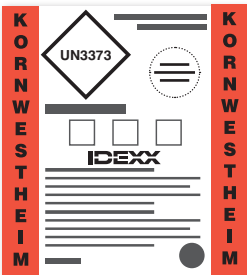

1. Bauen Sie den Karton auf (Aufbauanleitung auf der Rückseite des Kartons).
2. Verpacken Sie das Probenmaterial (Primärgefäß) in unsere IDEXX-Versandtasche:
  - Pro Versandtasche bitte nur einen Patienten.
  - Probengefäß jeweils mit saugfähigem Material umwickeln und in die Versandtasche legen. **Bitte weder Vlies noch Probengefäß zukleben.**
  - Entfernen Sie den Klebestreifen der Versandtasche und verschließen Sie diese sorgfältig.
  - Hinweis: Bitte verwenden Sie nur von IDEXX zur Verfügung gestellte Materialien; nicht bruchsichere Artikel sind nicht zum Probentransport zugelassen.
3. Verpacken Sie die Versandtasche gemeinsam mit dem Antragschein in den Versandkarton. Verschließen Sie die Box durch das Einklappen aller Kartonlaschen.
4. Vergessen Sie bitte nicht Ihre Absenderadresse sowie Ihre Telefonnummer in das vorgesehene Feld einzutragen und die Sendung ausreichend zu frankieren (Maxibrief).

Keine Briefmarke zur Hand? Frankieren geht auch online. Die Internetmarke für den Maxibrief zum Selbstausdruck:  
<https://shop.deutschepost.de/briefversand/online-frankieren>

Bitte achten Sie darauf, dass alle Gefahrgut-Kennzeichnungen wie auch die Adressbestandteile vollständig sichtbar bleiben (nicht überklebt werden).
5. Werfen Sie die Sendung in den nächsten Briefkasten\* der Deutschen Post oder geben Sie den Karton in Ihrer Postfiliale auf.

\*Bitte beachten Sie: der Karton passt zuverlässig in die sogenannten Säulen-Briefkästen der Deutschen Post, aber nicht in alle Modelle der Wand-Briefkästen (die Kastenöffnungen haben nicht alle die ausreichende Einwurfhöhe).

IDEXX GmbH

Humboldtstraße 2 | D-70806 Kornwestheim

[idexx.de](http://idexx.de)

© 2020 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten • 2012023-0221-DE • 09-0015568-00  
Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum von IDEXX Laboratories, Inc. oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Die IDEXX Datenschutzerklärung ist nachzulesen auf [www.idexx.com](http://www.idexx.com).