



Informationen zu unserer neuen Verpackungslösung

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

das Thema einer nachhaltigen Ressourcenschonung ist auch für IDEXX eine wichtige Herausforderung. Die Einsendungen Ihrer Probenmaterialien unterliegen aufwendigen Verpackungsrichtlinien. Diese stets sicher zu erfüllen, dabei aber den gesetzlich geforderten Verpackungsaufwand bestmöglich zu reduzieren, sollte unser gemeinsames Ziel sein.

Aus diesem Grund möchten wir Sie heute über die Einführung unserer neuen Sekundärverpackung für den Transport Ihrer Proben mit dem IDEXX-Kurier informieren.



Der Vorteil für Sie:

- Kein Verpacken in Schutzhülsen, das Probenröhrchen kommt direkt in den neuen Versandbeutel. Diese ist die notwendige und sichere Sekundärverpackung und gleichzeitig auch der Versandbeutel
- Bestellung und Lagerung der großvolumigen Schutzhülsen entfällt



Vorteile für die Umwelt

- Die neue Sekundärverpackung ersetzt die bisherigen Schutzhülsen und Versandbeutel
- Die Herstellung, der Transport und die Entsorgung der voluminösen Schutzhülsen und der bisherigen Versandbeutel entfallen
- Die neue Verpackung besteht zu 80 % aus Recyclingmaterial und wird nach Gebrauch ebenfalls in den Recyclingkreislauf gegeben
- CO₂ neutrale und zertifizierte Produktion sowie Einsparung von 17 Tonnen CO₂ pro Jahr



Nach einer erfolgreichen Testphase werden wir unsere neue Verpackungslösung nun allen unseren Kunden anbieten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von IDEXX





Neue Verpackungsanweisung

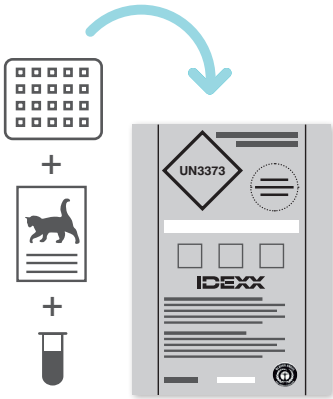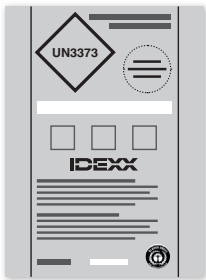

1.

Pro Versandbeutel bitte nur einen Patienten.

Hinweis: Für Kühlproben verwenden Sie bitte unsere Spezial-Versandbeutel. Diese erhalten Sie automatisch mit jeder Kühlcontainer-Bestellung (auch separat als Nachbestellung).

2.

Versandbeutel und saugfähiges Vlies zur Hand nehmen.

Probengefäß (ohne Schutzhülsen*) jeweils mit saugfähigem Material umwickeln und zusammen mit dem Antragsschein in den Versandbeutel legen. Bitte weder Vlies noch Probengefäß zukleben.

Hinweis: Der auf dem Versandbeutel aufgedruckte Barcode ersetzt **nicht** Ihre Kundenbarcodes; bitte diese unbedingt weiterhin wie gewohnt verwenden!

3.

Bitte verwenden Sie nur von IDEXX zur Verfügung gestellte Materialien; nicht bruchssichere Artikel sind **nicht** zum Probentransport zugelassen.

4.

Entfernen Sie den Klebestreifen und verschließen Sie den Versandbeutel sorgfältig.

5.

Den Versandbeutel in das IDEXX-Übergabedepot legen.

*Ausnahme: Objektträger, Kotproben- und Formalingefäße werden weiter mit ihrer Sekundärverpackung in den Versandbeutel gegeben

